



## Anleitung zur Installation des cyclotest® Patch


Starten Sie zunächst die Datei „Patch...exe“, aus dem heruntergeladenen Verzeichnis.

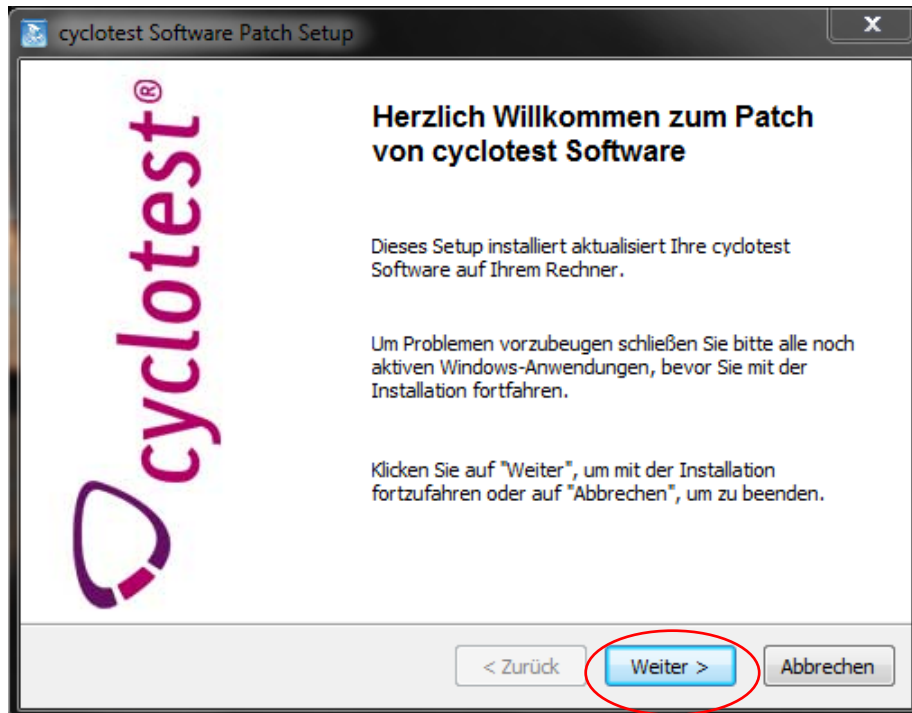

Klicken Sie dann auf „Weiter“....

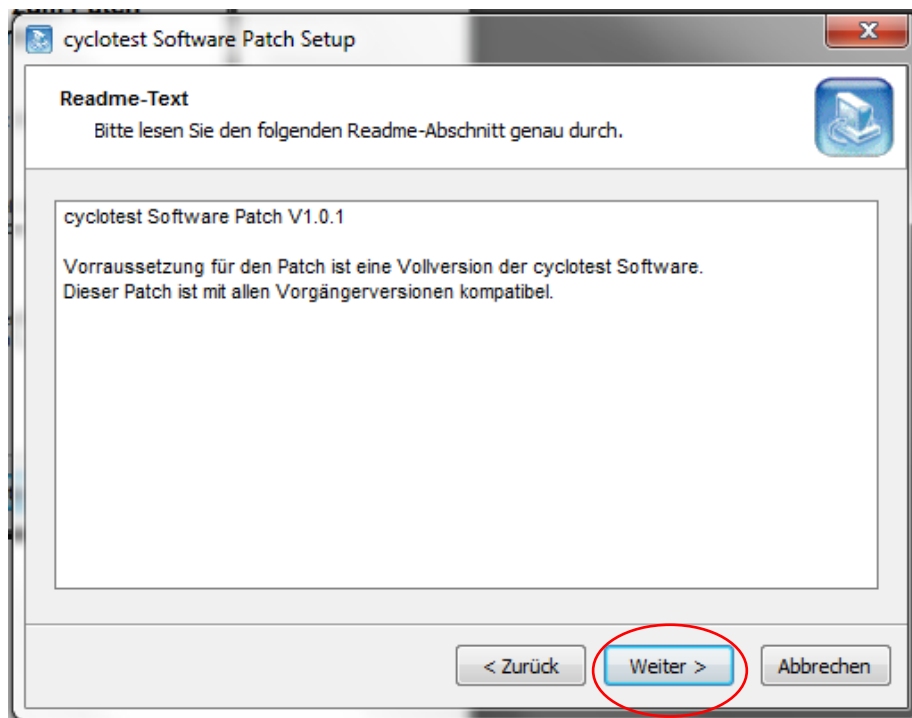

Klicken Sie auch hier auf „Weiter“, nachdem Sie den Readme-Text gelesen haben...

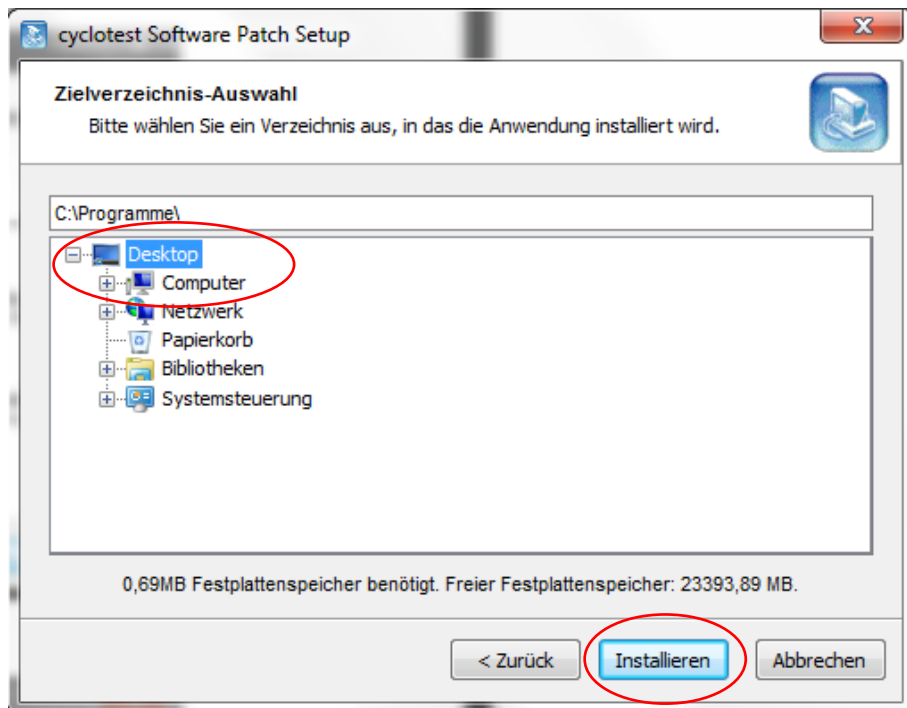


Bitte wählen Sie hier das Verzeichnis aus unter welchem Sie Ihre cyclotest Software installiert haben.

Das Standardverzeichnis ist: C:\Programme\Cyclotest

**Wichtig: Wählen Sie nicht einen der Unterordner an, sondern nur den Hauptordner „cyclotest“ !**

Und klicken Sie anschließend auf „Installieren“ ....

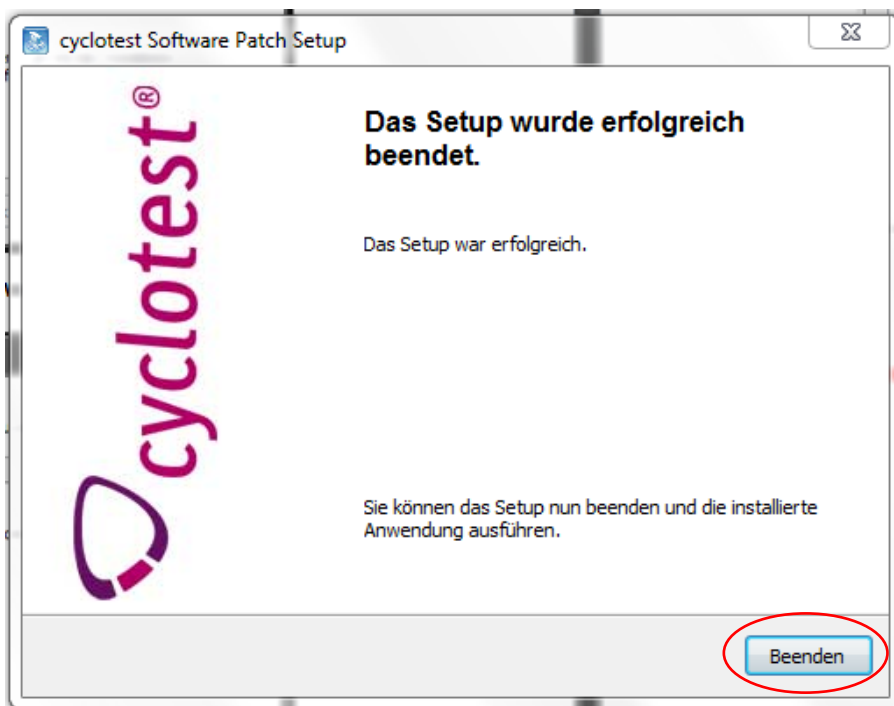

Klicken Sie nach der Installation auf „Beenden“ um das Setup zu schliessen.