



Verhütung ohne Hormone



cyclotest® 2 plus

Zyklus-Temperaturcomputer


Zykluscomputer zur einfachen und natürlichen Verhütung durch Messung der Aufwachtemperatur und die zusätzliche Eingabe von Eisprungsymptomen [Symptothermale Methode].

Und so funktioniert es


Nach dem Aufwachen

1. den Messfühler in den Mund nehmen
2. große runde Starttaste drücken
3. warten bis es piepst, fertig!


Babysymbole zeigen die aktuelle Phase des Zyklus an.

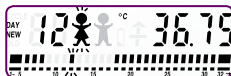

Das Babysymbol bedeutet: Empfängnis möglich

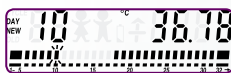

Kein Babysymbol bedeutet: Verhütungsmittel nicht nötig.

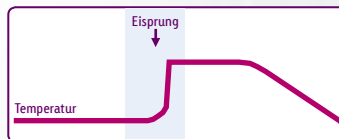

Je mehr Zyklusdaten gespeichert sind, desto genauer kann die fruchtbare Phase eingegrenzt werden.

Wie sicher ist cyclotest® 2 plus?

Wird nur die Aufwachtemperatur gemessen, liegt die Methodensicherheit bei 97 %.

Bei zusätzlicher Eingabe von Eisprungsymptomen steigt die Methodensicherheit auf 99 %.

Vergleich mit anderen Verhütungsmethoden

Ohne Anwendung von Mitteln	Pearl-Index
Coitus interruptus [vorzeitige Unterbrechung]	20
Kalendermethode [Knaus-Ogino]	20
Billingsche Methode	20
Temperaturmethode „strenge Form“	1
Temperaturmethode „erweiterte Form“	3
Symptothermale Methode	0,5-2,6
Hormonnachweismethode	6
Mechanische Verhütungsmittel	
Intrauterinpeppar (Spirale)	2-3
Kondom	3
Scheidendiaphragma	3-4
Hormonale Verhütungsmittel	
Ovulationshemmer Pille	0,2-0,5
3-Monats-Spritze	0,5

Mit USB-Schnittstelle

Mit der zusätzlich erhältlichen Software können Sie Ihre persönlichen Daten per USB-Schnittstelle ganz einfach am eigenen PC auswerten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cyclotest.de oder über unsere Hotline für persönliche und vertrauliche Beratung.

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany

