



Der natürliche Weg zum Wunschkind



cyclotest® baby Zyklus-Temperaturcomputer

Der lernfähige Minicomputer bestimmt die fruchtbaren Tage der Frau ganz natürlich durch Messung der Aufwachtemperatur.


Und so funktioniert es

Nach dem Aufwachen


1. den Messfühler in den Mund nehmen
2. große runde Starttaste drücken
3. warten bis es piepst, fertig!

Babysymbole zeigen an, wann die fruchtbare und hochfruchtbare Phase einsetzt.


Wird die hochfruchtbare Phase angezeigt, kann man mit Hilfe von cyclotest® Ovulations-test das Eisprunghormon LH (luteinisierendes Hormon) nachweisen und damit den optimalen Zeitpunkt für eine Empfängnis bestimmen.

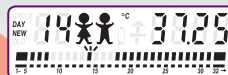

Zwei Babys bedeuten: hochfruchtbare Phase. Jetzt Teststicks verwenden.

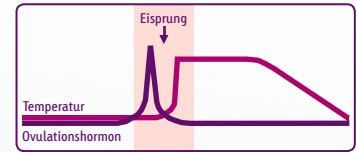

Je mehr Zyklusdaten gespeichert sind, desto genauer kann die fruchtbare Phase eingegrenzt werden.

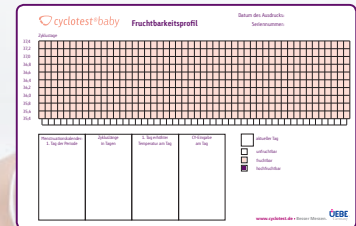

Mit USB-Schnittstelle und Software

Die gespeicherten Daten sind jederzeit auf Knopfdruck abrufbar. Ihr persönliches Fruchtbarkeitsprofil können Sie per USB-Schnittstelle ganz einfach am eigenen PC auswerten. Ein wichtiger Diagnosebeitrag für Ihren Gynäkologen.

cyclotest® service hotline
+49 (0) 93 42 / 92 40 40
www.cyclotest.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cyclotest.de oder über unsere Hotline für persönliche und vertrauliche Beratung.

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany





Verhütung ohne Hormone



cyclotest® control Zyklus-Temperaturcomputer


Der lernfähige Minicomputer erfasst Ihre persönlichen Zykluswerte ganz natürlich und grenzt die fruchtbare Phase, in der ein Schwangerschaftsrisiko besteht, ein.

Und so funktioniert es


Nach dem Aufwachen

1. den Messfühler in den Mund nehmen
2. große runde Starttaste drücken
3. warten bis es piepst, fertig!


Babysymbole zeigen die aktuelle Phase des Zyklus an.

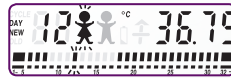

Das Babysymbol bedeutet: Empfängnis möglich

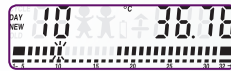

Kein Babysymbol bedeutet: Verhütungsmittel nicht nötig.

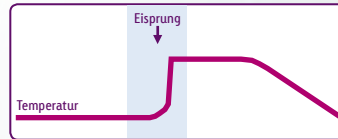

Je mehr Zyklusdaten gespeichert sind, desto genauer kann die fruchtbare Phase eingegrenzt werden.

Wie sicher ist die Temperaturmethode?

Die Temperaturmethode hat einen Pearl-Index von 1-3. Der Pearl-Index bewertet die Sicherheit einer Verhütungsmethode und zeigt die Anzahl ungewollter Schwangerschaften bei 100 Frauen, die ein Jahr mit der gleichen Methode verhütet haben.

Vergleich mit anderen Verhütungsmethoden

Ohne Anwendung von Mitteln	Pearl-Index
Coitus interruptus (vorzeitige Unterbrechung)	20
Kalendermethode (Knaus-Ogino)	20
Billingsche Methode	20
Temperaturmethode „strenge Form“	1
Temperaturmethode „erweiterte Form“	3
Symptomthermale Methode	0,5-2,6
Hormonnachweismethode	6
Mechanische Verhütungsmittel	
Intrauterinpeppar (Spirale)	2-3
Kondom	3
Scheidendiaphragma	3-4
Hormonale Verhütungsmittel	
Ovulationshemmer Pille	0,2-0,5
3-Monats-Spritze	0,5

Mit USB-Schnittstelle

Mit der zusätzlich erhältlichen Software können Sie Ihre persönlichen Daten per USB-Schnittstelle ganz einfach am eigenen PC auswerten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cyclotest.de oder über unsere Hotline für persönliche und vertrauliche Beratung.

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany

