

cyclotest®
Der natürliche Weg

Der natürliche Weg
zum Wunschkind



cyclotest® baby
Zyklus-Temperaturcomputer

Der lernfähige Minicomputer bestimmt die fruchtbaren Tage der Frau ganz natürlich durch Messung der Aufwachtemperatur.


Und so funktioniert es

Nach dem Aufwachen


1. den Messfühler in den Mund nehmen
2. große runde Starttaste drücken
3. warten bis es piepst, fertig!

Babysymbole zeigen an, wann die fruchtbare und hochfruchtbare Phase einsetzt.


Wird die hochfruchtbare Phase angezeigt, kann man mit Hilfe von cyclotest® Ovulationstest das Eisprunghormon LH (luteinisierendes Hormon) nachweisen und damit den optimalen Zeitpunkt für eine Empfängnis bestimmen.

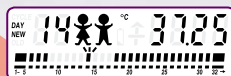

Zwei Babys bedeuten: hochfruchtbare Phase. Jetzt Teststicks verwenden.

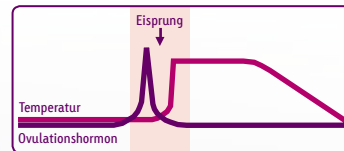

Je mehr Zyklusdaten gespeichert sind, desto genauer kann die fruchtbare Phase eingegrenzt werden.

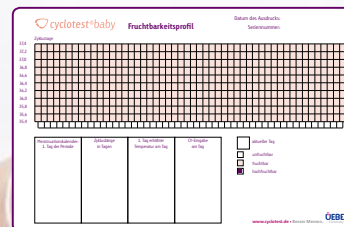

Mit USB-Schnittstelle und Software

Die gespeicherten Daten sind jederzeit auf Knopfdruck abrufbar. Ihr persönliches Fruchtbarkeitsprofil können Sie per USB-Schnittstelle ganz einfach am eigenen PC auswerten. Ein wichtiger Diagnosebeitrag für Ihren Gynäkologen.

cyclotest® service hotline
+49 (0) 93 42 / 92 40 40
www.cyclotest.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cyclotest.de oder über unsere Hotline für persönliche und vertrauliche Beratung.

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany

