



Ich bin mir sicher.

cyclotest[®] mySoftware

Gebrauchsanweisung



Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Die cyclotest® Service-Hotline	4
Installation	5
Benutzeroberfläche	6
Bedienung	8
Fruchtbarkeitsprofil	8
BMI	11
Software-Update	12
Datentransfer	14
Daten löschen	15
Persönliche Daten	16
Hilfe	17
Technische Informationen	18
Zeichenerklärung	19
Garantie	19

Vielen Dank, dass Sie sich für einen cyclotest® Zykluscomputer entschieden haben.

Die cyclotest® mySoftware ist eine Zusatzsoftware zur Übertragung und Darstellung von Messdaten des cyclotest® Zykluscomputers auf einen PC.

Mit Hilfe dieser Software ist es möglich, die Zyklusdaten im cyclotest® Zykluscomputer auszulesen und ein Fruchbarkeitsprofil als PDF Dokument zu erstellen.

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Anweisungen und Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Gerätes.

Liebe Leserin,

bitte lesen Sie unsere Hinweise zur Verwendung der cyclotest® mySoftware sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktionen vertraut.

Bei der Verwendung Ihres cyclotest® Zykluscomputers in Verbindung mit der cyclotest® mySoftware kann es vor allem am Anfang vorkommen, dass Ihnen einige Angaben ungewöhnlich vorkommen oder Fragen zur Handhabung auftauchen.

In solchen Fällen können Sie unsere cyclotest® Service-Hotline anrufen, die montags bis donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr und freitags bis 16.30 Uhr besetzt ist.



Auf das Gespräch mit Ihnen freut sich Ihr cyclotest® Beratungsteam.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 und höher, MAC OS ab 10.x



Für die Darstellung auf ihrem PC benötigen Sie einen PDF-Reader.

Sie finden den Link zum Download der cyclotest® mySoftware auf unserer Homepage www.cyclotest.de im Bereich „Service“ unter <http://www.cyclotest.de/service/cyclotest-mysoftware/>. Sollte die Autorun-Einstellung deaktiviert sein, müssen Sie die Installation nach dem Herunterladen der Software manuell starten.




Die Installation kann je nach Hardwarekonfiguration ein paar Minuten dauern.

Nun ist die Software bereit zur Verbindung mit Ihrem cyclotest® Zykluscomputer.

Hilfestellung bei Problemen während der Installation finden Sie auf unserer Homepage www.cyclotest.de im Bereich „Service“ unter „cyclotest mySoftware“. Auch die cyclotest® Service-Hotline steht Ihnen gerne zur Verfügung, Siehe Seite 4.

<http://www.cyclotest.de/service/cyclotest-mysoftware/>

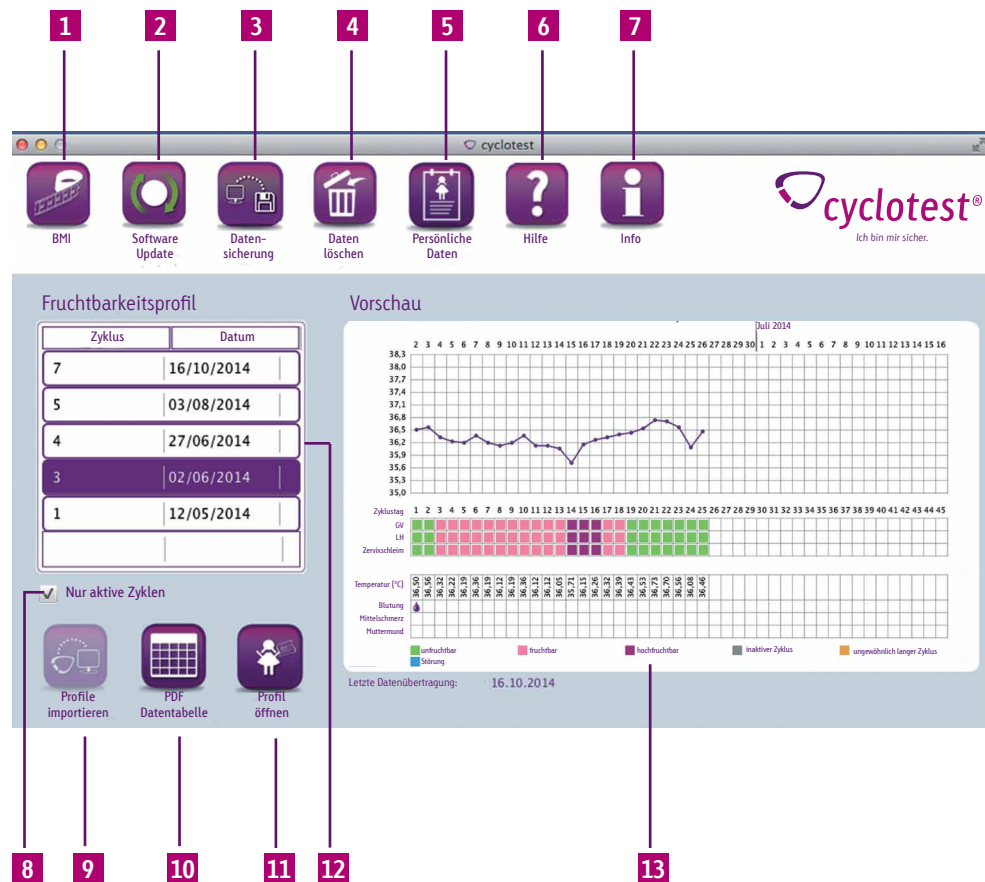

Elemente & Funktionen

- 1** Auswertung Ihrer BMI-Daten als Kurve und Tabelle [siehe S. 11]
- 2** Verfügbare Updates für Ihre cyclotest® mySoftware sowie Ihren Zykluscomputer [siehe S. 12]
- 3** Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten aus der cyclotest® mySoftware [siehe S. 14]
- 4** Löschen Ihrer Zyklusdaten aus Ihrem Zykluscomputer oder der PC-Software [siehe S. 15]
- 5** Anzeigen oder Verbergen Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse auf den Fruchtbarkeitsprofilen [siehe S. 16]
- 6** Gebrauchsanweisung, Hotline und Teamviewer-Verbindung [siehe S. 17]
- 7** Informationen über die cyclotest® mySoftware
- 8** Anzeigen oder Verbergen der inaktiven Zyklen [siehe S. 8]
- 9** Zyklusdaten aus Ihrem cyclotest® Zykluscomputer auslesen [siehe S. 8]
- 10** Tabellarische Darstellung Ihrer eingelesenen Zyklen als PDF [siehe S. 10]
- 11** Öffnen des ausgewählten Fruchtbarkeitsprofils als PDF [siehe S. 10]
- 12** Überblick Ihrer importierten Zyklen, sortiert nach Zyklusstart-Datum [siehe S. 8]
- 13** Vorschau des ausgewählten Fruchtbarkeitsprofils [siehe S. 9]

Fruchtbarkeitsprofil

Bevor Sie die cyclotest® mySoftware öffnen, sollte der Zykluscomputer mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Das Auslesen der Daten ist nur möglich, wenn die Installation komplett durchgeführt wurde. Ob die Installation erfolgreich war, erkennen sie daran, dass das Icon aktiv wird.

 Profile Importieren aktiv

 Profile Importieren inaktiv


Mit einem Klick auf „Profile importieren“ werden alle vorhandenen Daten aus Ihrem cyclotest® Zykluscomputer ausgelesen. Die Zyklen erscheinen dann sortiert nach Zyklusstart-Datum in der Tabelle „Fruchtbarkeitsprofil“.

☒ Nur aktive Zyklen


Durch Setzen oder Entfernen des Häkchens bei „Nur aktive Zyklen“ können Sie die im Zykluscomputer als inaktiv markierten Zyklen in der Fruchtbarkeitsprofil-Tabelle ein- oder ausblenden.

Fruchtbarkeitsprofil	
Zyklus	Datum
7	16/10/2014
5	03/08/2014
4	27/06/2014
3	02/06/2014
1	12/05/2014

Indem Sie einen Zyklus in der Tabelle „Fruchtbarkeitsprofile“ auswählen, wird Ihnen dieser Zyklus im Fenster „Vorschau“ angezeigt.

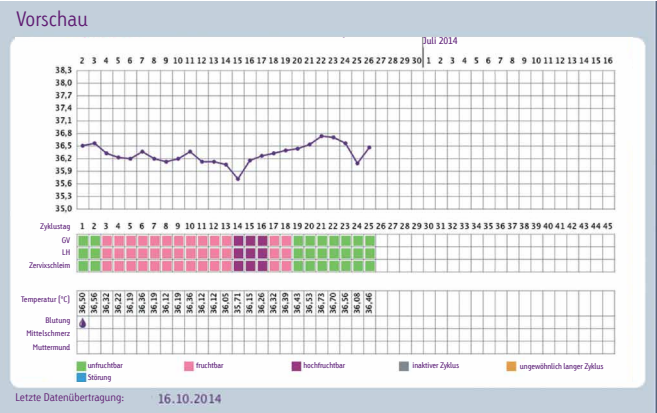

Durch einen Doppelklick auf den Zyklus in der Tabelle, einen Klick auf den Zyklus in der Vorschau oder auf „Profil öffnen“ öffnet sich das ausgewählte Fruchtbarkeitsprofil in einem Vorschaufenster.

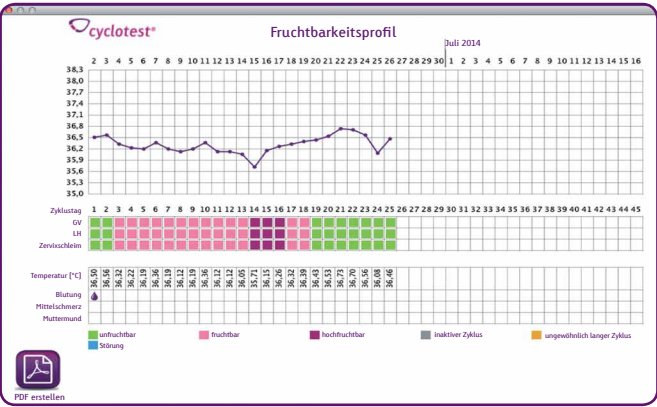




Durch einen Klick auf „PDF erstellen“ können Sie Ihr Fruchtbarkeitsprofil speichern und öffnen.

Eine manuelle Protokollführung wird dadurch gänzlich unnötig. Während Ihr Frauenarzt in der Vergangenheit noch die Führung eines Menstruationskalenders empfahl, kann er heute Ihr cyclotest® mySoftware-Fruchtbarkeitsprofil studieren.



Möchten Sie sämtliche bereits eingeleseene Zyklen in einer Tabelle darstellen lassen, klicken Sie auf „PDF Datentabelle“. Nach dem Speichern des PDF können Sie dieses öffnen und sehen Ihre Zyklen im Überblick.



Profilübersicht

Name: Mia Muster

Email: mia.muster@muster.de

Datum des Ausdrucks: 16.10.2014


Seriennummer: 1409000003

Zyklus Nr.	1. Tag der Periode	Zykluslänge in Tagen	1. Tag erhöhte Temperatur am Tag	LH-Eingabe am Tag	Messort
7	16/10/2014	6	-	-	oral
6	02/10/2014	14	-	-	oral
5	03/08/2014	60	-	-	oral
4	27/06/2014	37	25	-	oral
3	02/06/2014	25	17	-	oral
2	01/06/2014	1	-	-	oral
1	12/05/2014	20	-	-	oral



BMI

Beim Klick auf das BMI-Icon öffnet sich ein Vorschauenster, das alle vorhandenen Daten in grafischer Form (als Kurve und Tabelle) darstellt.

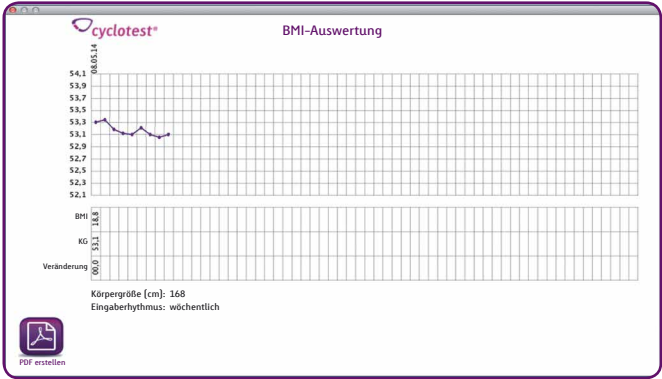

Mit der Funktion „PDF erstellen“ können Sie die BMI-Auswertung speichern und öffnen.

Software-Update

Das Programm sucht automatisch nach Aktualisierungen. Falls Ihre cyclotest® mySoftware oder die Firmware Ihres Zykluscomputers nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, werden die Pfeile im Icon grün.






Mit einem Klick auf das Icon „Software Update“ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie durch die Installation geführt werden.



Hinweis: Die Aktualisierung beansprucht einige Minuten. In dieser Zeit darf der Zykluscomputer nicht vom PC getrennt werden.



Das Update wird durch Drücken des Buttons gestartet.

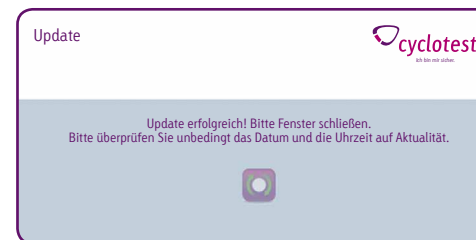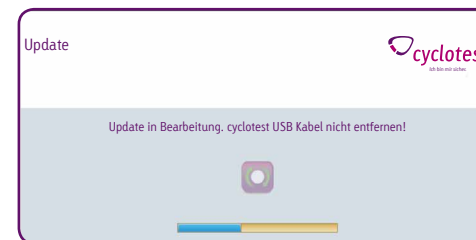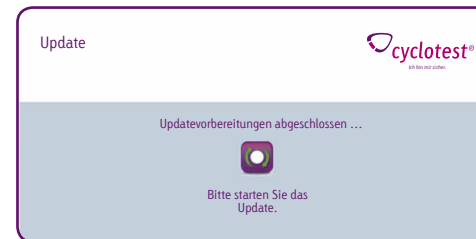

Sobald der Updatevorgang abgeschlossen wurde, schließen Sie das Hinweisfenster. Nun darf der cyclotest® Zykluscomputer vom PC getrennt werden.

Datentransfer

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Daten lokal auf einen anderen PC oder auf ein Sicherungsmedium zu übertragen.

Außerdem können Sie die Daten mit dieser Funktion auf dem neuen PC wiederherstellen.



Daten löschen

Durch einen Klick auf „Software“ haben Sie die Möglichkeit, alle Daten, die in Ihrer cyclotest® mySoftware gespeichert sind, zu löschen.

Durch einen Klick auf „Zykluscomputer“, können Sie alle Zyklusdaten, die in Ihrem cyclotest® Zykluscomputer gespeichert sind, unwiderruflich löschen.



Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Daten, nachdem sie gelöscht wurden, nicht wiederhergestellt werden können.

Persönliche Daten

Mit Klick auf das Icon „Persönliche Daten“ können Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Diese Angaben werden durch einen Klick auf Speichern übernommen und sind dann in Ihren Fruchtbarkeitsprofilen sichtbar.



Persönliche Daten

Verbergen

Name Mia Muster

E-Mail mia.muster@muster.de

Speichern

Hinweis: Möchten Sie nicht, dass Ihre persönlichen Daten in Ihren Fruchtbarkeitsprofilen angezeigt werden, setzen Sie ein Häkchen im Feld „Verbergen“.

Hilfe

Mit einem Klick auf das Icon „Hilfe“ können Sie die Gebrauchsanweisung Ihres cyclotest® Zykluscomputers als PDF direkt von der Website laden.



Außerdem finden Sie hier Infos zur cyclotest® Hotline sowie das Support-Modul „Teamviewer Fernwartung“, falls Sie technischen Support benötigen.



Zusätzliche Geräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen nachweisbar den ihnen entsprechenden IEC- oder ISO-Normen entsprechen (z. B. IEC 60950 für datenverarbeitende Geräte). Weiterhin müssen alle Konfigurationen den normativen Anforderungen für medizinische Systeme entsprechen (siehe IEC 60601-1-1 oder Abschnitt 16 der 3. Ausgabe der IEC 60601-1, jeweils).

Wer zusätzliche Geräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, ist Systemkonfigurierer und damit verantwortlich, dass das System mit den normativen Anforderungen für Systeme übereinstimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass lokale Gesetze gegenüber obigen normativen Anforderungen Vorrang haben. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Fachhändler oder den technischen Dienst.

Durch die Installation, das Kopieren oder die anderweitige Nutzung dieser Software erkennen Sie die nachfolgend aufgeführten Haftungsbeschränkungen an. Im größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang lehnen die UEBE Medical GmbH und deren Lieferanten jede Haftung für irgendwelche besonderen, zufälligen, indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder irgendwelchen anderen Vermögensschäden) ab, die durch die Verwendung der Software oder durch die Tatsache, dass sie nicht verwendet werden kann, entstehen; dies gilt auch dann, wenn die UEBE Medical GmbH zuvor auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der UEBE Medical GmbH und ihrer Lieferanten nach dieser Vereinbarung auf den tatsächlich von Ihnen für die Software gezahlten Betrag, wenn die Auswirkung dieser Klausel durch geltendes Recht nicht besonders ausgenommen wurde.

Jeglicher Verleih bzw. unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung oder Sendung dieser Software verstößt gegen geltendes Recht. Diese Software-Lizenzvereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Zeichen



Gebrauchsanweisung beachten!



USB-Schnittstelle zur Verbindung mit einem PC



Hersteller

Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres cyclotest® Zykluscomputers.

REF 66001

cyclotest® und UEBE® sind international geschützte Warenzeichen der



UEBE Medical GmbH

Zum Ottersberg 9

97877 Wertheim, Deutschland

Tel.: + 49 (0) 93 42 / 92 40 40

Fax: + 49 (0) 93 42 / 92 40 80

E-Mail: info@uebe.com

Internet: www.uebe.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, untersagt.
© Copyright 2017 UEBE Medical GmbH

CE 0123

UEBE[®]
Germany est. 1890

7 066001 001 B 2017-01